

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

249 A



CE

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací zesílený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace, polstrovaným sedátkem a nákupním košíkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška madel: 81-98 cm

Výška sedátka: 55 cm

Šířka sedátka: 46 cm

Celková šířka: 70 cm

Hmotnost: 10 kg

Nosnost: 318 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte chodítko k sezení.

Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 318 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

Chodítko není určeno pro transport sedících uživatelů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly, 4 vidlice s kolečky, bowdenové brzdy, košík, sedátko, opěrku zad, 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel a 4 šrouby k zajištění vidlic koleček.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA


Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Přiložená madla vložte do otvorů (A), nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubů (1) a pečlivě dotáhněte. Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Opěrku zad zasuňte do otvorů (B) zmáčknutím pojistek (2). Nasadte přední vidlice s kolečky do připravených otvorů (C) na spodní straně rámu a upevněte je pomocí šroubů (3). Nakonec nasadte košík, který se volně zavěsí na rám chodítka pod sedátkem. Nyní je chodítka připraveno k použití.



Madla zasuňte do otvorů **A**, opěrku zad do otvorů **B**, vidlice kol do otvorů **C**.



Šrouby k nastavení madel

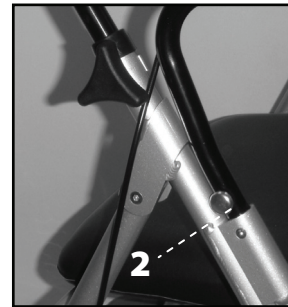

Pojistky na opěrky zad





Šrouby k uchycení vidlic koleček

Při skládání chodítka nadzdvihněte sedátko a zatažením za šňůrku (4) směrem vzhůru složte rám směrem k sobě.



BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy !!!

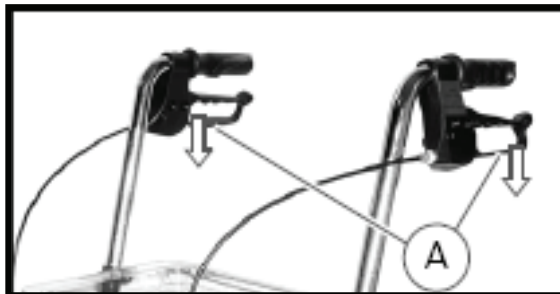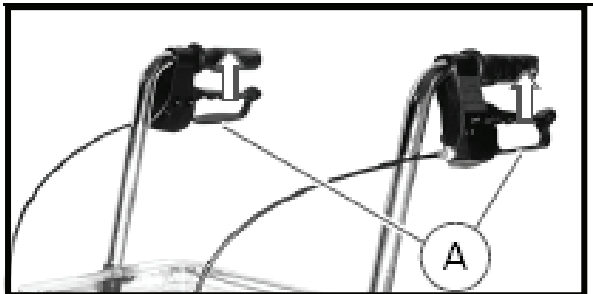

Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrždění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.



ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.